

GLUTASEPT

Preparat gata de utilizare, neactivat, cu acțiune bactericidă (incl. tuberculocidă), fungică, virucidă și sporicidă cu efect de sterilizare sau curățare și dezinfectie.



0120 Marcaj CE - SGS Marea Britanie

SOLUȚIE INACTIVATĂ

Compoziție:

Glutaraldehidă – 2%, detergenți neionici, inhibitori de coroziune, parfum, indicator PH.

Instrucțiunile de utilizare:

- curățarea și dezinfectia instrumentelor medicale și dentare, echipamente de anestezie și endoscoape (inclusiv cele sensibile);
- sterilizare chimică la rece a materialelor instabile termic (echipament medical, instrumente, etc.)

*Preparatul are două componente: soluția de bază și activatorul.
Activați soluția cu cantitatea proporțională de activator.
După adăugarea activatorului culoarea soluției devine albastru/violet.
Soluția activată se poate utiliza până la 30 de zile chiar și cu încărcătură.
La schimbarea culorii către galben soluția își pierde din eficiență și trebuie înlocuită.*

Soluție	Activator
1 litru	40 ml
2 litri	80 ml
3 litri	120 ml
4 litri	160 ml
5 litri	200 ml

Folosire	Soluția de lucru	Mod de utilizare	Timp de expunere
Curățarea și dezinfectia instrumentelor medicale și a sticlăriei de laborator	Soluția activată	Imersați într-o cuvă cu lichid închisă. Soluția trebuie să acopere obiectele și să umple toate golurile echipamentului.	15 min
Echipament special și materiale instabile termic – acțiune sporicidă			60 min
Sterilizare chimică la rece Reducerea sporilor în totalitate (100%)			360 min

Condiții de stocare:

Păstrați produsul în recipientul original bine închis în locuri uscate și bine ventilate, ferit de lumina soarelui la o temperatură între 2 și 30 °C, departe de băuturi și alimente.

Folosiți doar conform instrucțiunilor de pe etichetă.

După utilizare, ambalajele vor fi reciclate conform legislației locale.

Mod de ambalare: canistră 5 litri + activator de 200 ml

DOAR PENTRU UZ EXTERN!

Distribuitor:
SWISS PHARM

SOLUȚIE PENTRU STERILIZARE CHIMICĂ LA RECE