

Utilizare

Soluția de spălare concentrată utilizată pentru a optimiza performanța fluidică a analizoarelor automate de chimie clinică.

NOTĂ IMPORTANTĂ: Formularea acestei soluții nu afectează rezultatele analitice.

Pregătirea

Se diluează soluția de spălare concentrată cu apă distilată într-un raport de 1 ml: 1000 ml

Conservare și stabilitate

Soluția concentrată este stabilă până la data de expirare dacă este păstrată la 15-25 ° C, dacă este închisă după colectare, ferită de contaminare.




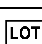
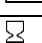
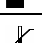


Precauții și avertismente

Produsul nu este clasificat ca substanță periculoasă (Decretul Legislativ nr. 285 art. 28 Legea nr. 128 din 1998). Concentrația finală a componentelor este mai mică decât limitele impuse de Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 - CLP (cu modificările ulterioare) și prin Directiva 88/379/CEE și modificările ulterioare la clasificarea-ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase.

Eliminarea deșeurilor

Produsul trebuie eliminat în conformitate cu reglementările normale de gestionare a deșeurilor.

Simboluri

	Risc biologic
	Marcajul CE (Regulamentul 98/79 CE)
	Dispozitiv medical in vitro
	Codul lotului
	Utilizati pana la
	Limitele temperaturii de depozitare
	Cititi instructiunile pentru utilizare
	Swiss Pharm Import - Export