



SEPTOQUAT

DEZINFECTANT- DETERGENT
CONCENTRAT PENTRU SUPRAFETE
CURATA SI DEZINFECTEAZA INTR-O SINGURA ETAPA

NU NECESITA CLATIRE

Compoziție:

- Benzalkonium chloride - 20 g/100 ml
- Didecyldimethylammonium chloride - 30 g/100 ml
- Propan-2-ol, parfum (lămâie și măr).
- Inhibitori de coroziune, surfactanți nelonici.

CARACTERISTICI:

- Lichid galben deschis, cu miros de lămâie și măr, pH – 8.5-9.5.
- **Septoquat** nu conține aldehyde, fenoli, clor și ingredientele sale active sunt biodegradabile.
- Materile organice nu afectează activitatea biocidă a soluției de lucru.
- **Septoquat** nu corodează materialele tratate.
- Soluția de lucru are un miros plăcut și poate fi folosită până la 14 zile după preparare.

SPECTRU DE ACTIVITATE:

Septoquat este un preparat biocid cu spectru de activitate larg: bactericid (inclusiv faza 2, etapă 2), tuberculocid, micobactericid, fungicid (inclusiv faza 2, etapă 2) și virucid (Influenza virus – Influenza A2, Herpes simplex, Adenovirus, Poliovirus, Vaccinia virus, HAV/HBV/HCV/HIV).

DOMENIUL ȘI ARIA DE UTILIZARE:

Sanitar: Dezinfecția și curățarea suprafețelor:

- pardoseli, pavimente, pereți, scări, lambriu, uși, saloane de operații, săli de așteptare din spitale, cabinete medicale, cabinete de consultații cu profil stomatologic și ginecologic, maternități, laboratoare de analize medicale, contaminate cu fluide, etc.;
- obiecte sanitare, cabine de duș, covoare, căzi de baie, chiuvete, vase WC, pisoar, vase de pat, baloane pisoar, containere pentru deșeurii;
- mese de operații, paturi, cărucioare, containere, cărucioare de transport bolnavi, ambulante;

Alimentar: Suprafețe (hale de producție, utilaje și instalații, depozite, etc.), ustensile și echipamente din bucătării și officii alimentare, vehicule de transport animale și alimente crude și/sau procesate.

COMPATIBILITATE CU MATERIALELE:

Compatibilitate cu majoritatea materialelor inclusiv sticlă, plastic, metal, inox, nichel, cauciuc, ceramică, porțelan, gresie, faianță, mozaic, marmură, lemn tratat și alte materiale sensibile.

INDICAȚII DE UTILIZARE:

Aria de utilizare	Concentrație	Metoda de aplicare	Timp de expunere
Sanitar: Toate tipurile de suprafețe rezistente la apă din instituții de sănătate, spitale, colectivități, hoteluri, industria farmaceutică și cosmetică	0,50 % 50 ml / 10 l	Prin ștergere, sprayere sau automat fără clătire ulterioară	30 min
	0,75 % 75 ml / 10 l		15 min
Alimentar: Suprafețe din industria alimentară (spații de producție, utilaje și instalații, depozite, etc.), ustensile și echipamente din bucătării și officii alimentare, vehicule de transport animale, alimente crude și / sau procesate.	0.25% 25 ml / 10 l	Prin ștergere, imersie/înmuiere, fără clătire ulterioară	30 min

AMBALAJ: Canistre 5 l și flacoane de 1.000 ml.

Termen de valabilitate; 3 ani