

FERRITIN CALIBRATOR

Cod produs: SWPH004FER

CE  Pentru dispozitive medicale in vitro

AMBALARE

CAL 1: 1 * 1 ml

CAL 2: 1 * 1 ml

CAL 3: 1 * 1 ml

CAL 4: 1 * 1 ml

UTILIZARE

Set de calibrare, pentru diagnostic in vitro, utilizat pentru rulara curbei de calibrare pentru determinarea cantitativă a feritinei în ser.

Compoziție

Produs de origine umană. Concentrația în ng/ml este indicată pe etichetele flacoanelor.

Conține <0,1% azidă de sodiu.

BATCH	FER LEVEL 1	FER LEVEL 2	FER LEVEL 3	FER LEVEL 4
B42640E	25 ng/mL	100 ng/mL	200 ng/mL	500 ng/mL

PREGATIREA

Soluții standard de feritină 4 niveluri de 1 ml


Gata de folosit.

DEPOZITARE ȘI STABILITATE

Kitul este stabil până la data de expirare indicată pe etichetă dacă este păstrat între 2-8°C. Standardele conțin conservanți, dar sunt încă susceptibile la contaminare. Manipulați cu precauțiile normale.

Precauție în utilizare

Produsul nu este clasificat ca fiind periculos (DLg. N. 285 art. 28 l. n. 128/1998).

 Produsul de origine umană este obținut folosind numai sânge de la donatori testati prin metoda FDA și găsit nereactiv pentru HbsAg și negativ pentru anticorpi la HIV-1/2 și HCV.

Concentrația finală a componentelor este sub limitele impuse de Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 - CLP (și modificările ulterioare) și Directiva 88/379/CEE și modificările ulterioare la clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase, nici o metodă de testare cunoscută nu poate oferi o asigurare completă că produsul derivat din sângele uman transmite boli infecțioase, acest produs trebuie manipulat ca material biologic potențial infecțios cu precauție, conform bunelor practici de laborator.








GESTIONAREA DEȘEURILOR

Vă rugăm să consultați cerințele legale locale.

BIBLIOGRAFIE

Biosecuritate în laboratoarele microbiologice și biomedicale. Manual CDC/NIH, ediția a 4-a, 1999.

SIMBOLURI

	Risc biologic
CE	Marcajul CE (Regulamentul 98/79 CE)
	Dispozitiv medical in vitro
	Codul lotului
	Utilizati pana la
	Limitele temperaturii de depozitare
	Cititi instructiunile pentru utilizare
	Swiss Pharm Import - Export