



ENZYDIP - 3

**CONCENTRAT NEUTRU PENTRU CURĂȚAREA ENZIMATICĂ
A DISPOZITIVELOR SI SUPRAFETELOR MEDICALE
ÎNAINTE DE DEZINFECTARE SAU STERILIZARE**

EnzyDip – 3 este special conceput pentru curățarea manuală a dispozitivelor medicale, instrumentelor chirurgicale și stomatologice sensibile și care se curăță greu. O bună curățare prealabilă asigură o siguranță mai mare la dezinfectarea sau sterilizarea următoare.

Compoziție:

- Substanțe active de suprafață
- Enzime (lipaza, amilaza, proteaza)
- Stabilizatoare, agenți de chelare, inhibitori de coroziune, conservanți

Instrucțiuni de utilizare:

În funcție de gradul și tipul de contaminare preparatul poate fi folosit în diferite concentrații. Diluarea recomandată este de 1:100 cu apă de la robinet. Pentru suprafețe diluarea poate ajunge până la 1:200. Instrumentele sunt imersate pentru 5 – 10 minute în cuvă cu soluție de lucru (0.5 - 1.0 %) la temperatura camerei. Temperatura poate să fie ridicată la aproximativ 40 °C, pentru o curățare mai rapidă. Curățarea este semnificativ mai rapidă într-o baie cu ultrasunete (1 – 3 minute).

Țevi, furtunuri, spații interioare trebuie să fie spălate cu un flux de preparat, având grijă să nu rămână goluri și bule mari de aer. Murdăria uscată se îndepartează cu un efect mai lung sau prin utilizarea periilor, bureților etc.

După curățare, instrumentele se clătesc bine cu apă de la robinet.

Mod de ambalare: Flacon 3 litri.

DOAR PENTRU UZ EXTERN!

