



GLUTASEPT

SOLUȚIE PENTRU DEZINFECTIE SI STERILIZARE CHIMICA LA RECE

Preparat gata de utilizare, neactivat, cu acțiune bactericidă (incl. tuberculocidă), fungicidă, virucidă și sporicidă cu efect de curățare și dezinfectie/sterilizare.

SOLUȚIE INACTIVATĂ

Compoziție:

Glutaraldehydă – 2%, detergenți neionici, inhibitor de coroziune, parfum, indicator PH.

Instrucțiuni de utilizare:

- curățarea și dezinfectia instrumentelor medicale și dentare, echipament de anestezie și endoscoape (inclusiv cele sensibile);
- sterilizare chimică la rece a materialelor instabile termic (echipament medical, instrumente, etc.)

Preparatul are două componente: soluția de bază și activatorul.

Activați soluția cu cantitatea proporțională de activator.

După adăugarea activatorului culoarea soluției devine albastru/violet.

Soluția activată se poate utiliza până la 30 de zile chiar și cu încărcătură.

La schimbarea culorii către galben soluția își pierde din eficiență și trebuie înlocuită.

Soluție	Activator
1 litru	40 ml
2 litri	80 ml
3 litri	120 ml
4 litri	160 ml
5 litri	200 ml

Folosire	Soluția de lucru	Mod de utilizare	Timp de expunere
Curățarea și dezinfectia instrumentelor medicale și a sticlăriei de laborator	Soluția activată	Imersați într-o cuvă cu lichid închisă. Soluția trebuie să acopere obiectele și să umple toate golurile echipamentului.	15 min
Echipament special și materiale instabile termic – acțiune sporicidă			60 min
Sterilizare chimică la rece <i>Reducerea sporilor în totalitate (100%)</i>			360 min

Condiții de stocare:

Păstrați în recipientul original bine închis în locuri uscate și bine ventilate, ferit de lumina soarelui la o temperatură între 2 și 30°C, departe de băuturi și alimente.

Nu aruncați preparatul neutilizat în sistemul de canalizare local sau în mediul înconjurător.

Folosiți doar conform instrucțiunilor de pe etichetă.

După utilizare, ambalajele vor fi reciclate conform legislației locale

Mod de ambalare: canistră 5 litri + activator de 200 ml

DOAR PENTRU UZ EXTERN!

