



SEPTOQUAT-AM MD

SOLUȚIE PENTRU DEZINFECȚIE ȘI CURĂȚARE
INSTRUMENTAR MEDICAL ȘI DENTAR

Preparat concentrat cu acțiune bactericidă, fungicidă, virucidă și efect de curățare pentru instrumente medicale și dentare.

CE 0120

Marcaj CE - SGS Marea Britanie

Compoziție în 100 g:

Clorură de benzalconium – 10 g

Clorură de didecildimetilamoniu -5 g

N-(3-aminopropyl)-N-Dodecyldipropane-1,3-diamide – 6 g

Inhibitori de coroziune, agenți de curățare

Instrucțiuni de utilizare:

Soluția de lucru se prepară prin dizolvarea în apă a cantității corespunzătoare de concentrat (conform tabelului prezent și pe etichetă) cu ajutorul dozatorului atașat.

| | | |
|------------------|-----------------------|-------------------|
| Batericid | 0,25 % in 30 min. | |
| Fungicid | 0,25 % in 60 min. | 0,75 % in 15 min. |
| Tuberculocid | 2 % in 60 min. | |
| Hepatita C / HIV | 0,25 % in 15 min | |
| Hepatita B | 0,5 % in 15 min | |
| Polyoma SV 40 | 0,75 % in 15min. | |
| Adenovirus | 0,25 % in 15 min. | |

După dezinfecție, clătiți instrumentarul cu multă apă.

După preparare, soluția va rămâne eficace timp de 7 zile.

În caz de murdărire puternică se recomandă schimbarea soluției mai devreme.

Condiții de stocare:

Păstrați produsul în recipientul original bine închis în locuri uscate și bine ventilate, ferit de lumina soarelui, departe de băuturi și alimente. După utilizare, ambalajele vor fi reciclate conform legislației locale.

Mod de ambalare: Flacon 1 l și canistră 5 l.

DOAR PENTRU UZ EXTERN!

