



swiss
pharm®

ZHIVASEPT RAPID

Dezinfectant de contact, cu acțiune rapidă,
aplicat prin dispersie dirijată

DEZINFECTIE RAPIDĂ PE BAZĂ DE ALCOOL PENTRU
SUPRAFEȚE DISPOZITIVE MEDICALE

CARACTERISTICI:

Preparat gata de utilizare cu miros plăcut pentru dezinfecția rapidă a suprafețelor rezistente la alcool.

ARIA DE UTILIZARE:

Dezinfecția rapidă a suprafețelor din unitățile sanitare, cabinetele medicale de orice tip, instituții publice și de învățământ (școli, grădinițe, creșe).

Dezinfecția rapidă a suprafețelor mici și mobilierului: dispozitive medicale, mobilier, cărucioare, paturi, saltele, clanțe, mânere, telefoane, mese de lucru, etc.

Dezinfecția rapidă în secțiile de intervenție (sali de operații, saloane de reanimare, etc.), sectoare din spitale, (salonuri, săli de primire și examinare urgențe), utilități comune (holuri de acces, ascensoare, săli de așteptare), dezinfecția rapidă a ambulanțelor, vehicule de transport copii, calatori, etc.

SPECTRU DE ACTIVITATE și TIMPUL de CONTACT:

Aria de aplicare	Spectru de acțiune	Timp
Dezinfecția rapidă a suprafețelor	Bactericidă (inclusiv MRSA), micobactericidă, fungicidă	1 min.
	Virucidă	5 min.

INSTRUCIUNI DE UTILIZARE:

Dezinfecția se face prin pulverizarea preparatului pe suprafețe și obiecte, folosind pompa pulverizatoare de pe flacon, de la o distanță de aprox. 30 cm.

După expirarea timpului de contact, obiectele pot fi utilizate imediat fără clătire.

AMBALARE: Flacoane de 750 ml dotate cu cap de pulverizare.